

Fußabduktionsorthese zur Nachbehandlung eines idiopathischen Klumpfußes im Rahmen der Ponseti-Therapie.
Empfohlene Behandlungsdauer: vom Zeitpunkt der letzten Gipsabnahme bis zum 4./5. Lebensjahr des Kindes.



Lieferumfang:

ALFA-Flex oder COMFOOT-Blue Schuhe/Fußhalterungen
Inbus-Schlüssel 4/5 mm, Torx-Schlüssel TX10/20
ECO-Brace Light Fußabduktionsschiene

Wichtige Informationen:

Schiene: Zur Verwendung für eine Therapiedauer von max. 5 Jahren. Gesamtlebensdauer: 8 Jahre.

Schuhe: Lebensdauer 3,5 Jahre

Das Jahr der Herstellung können Sie den ersten zwei Ziffern der Seriennummer entnehmen.


Lagerung: Frostfrei, lichtgeschützt, mittelhohe Luftfeuchte

Reinigung: Nur mit feuchtem Tuch reinigen, keine scharfen Reinigungsmittel verwenden



Längeneinstellung der Schiene:

- Länge variabel von 200 – 290 mm
- 2 Schrauben oben und unten am Schienensteg lösen (Torx-Schlüssel TX20)
- Schienenlänge auf mindestens(!) Schulterbreite des Kindes einstellen
- Selbstsichernde Schraube fest anziehen.

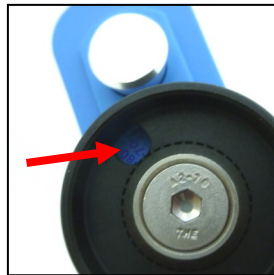

Abduktionswinkeleinstellung:

- Schraube an der Unterseite der Schiene eine viertel Drehung lösen (Inbusschlüssel 4mm).
- Die blaue Schuhaufnahmeplatte schrittweise nach außen drehen und bei der entsprechenden Gradzahl (im Sichtfenster ablesbar) einrasten lassen (Ponseti empfiehlt 70° bei einem Klumpfuß, 40° bei einem gesunden Fuß).
- Selbstsichernde Schraube fest anziehen.

Anziehen Schuhe und Schiene:

- Fuß in den Schuh setzen, sodass die Ferse ganz hinten und unten ist – Kontrolle im Fersenfenster
- Erst den mittleren Riemen schließen und fest anziehen (hält die Ferse in richtiger Position), die anderen Riemen lockerer anlegen.
- Schuh von oben auf Klickverschluss setzen und Schiene nach hinten Richtung Ferse schieben bis Bolzen einrastet. Zum Lösen der Schiene Bolzen ziehen, Schiene bis zum Anschlag in Richtung Fußspitze schieben und abheben.

Schuhe nicht zum Laufen geeignet! Rutschgefahr!