

Fußabduktionsorthese zur Nachbehandlung eines idiopathischen Klumpfußes im Rahmen der Ponseti-Therapie.
Empfohlene Behandlungsdauer: vom Zeitpunkt der letzten Gipsabnahme bis zum 4./5. Lebensjahr des Kindes.



Lieferumfang:

ALFA-Flex oder COMFOOT-Blue Schuhe/Fußhalterungen
Inbus-Schlüssel 4 mm
Torx-Schlüssel TX20
ALFA-Flex Brace Fußabduktionsschiene


Wichtige Informationen:

Schiene: Zur Verwendung für eine Therapiedauer von max. 5 Jahren. Gesamtlebensdauer: 8 Jahre.
Schuhe: Lebensdauer 3,5 Jahre
Das Jahr der Herstellung können Sie den ersten zwei Ziffern der Chargennummer entnehmen.
Lagerung: Frostfrei, lichtgeschützt, mittelhohe Luftfeuchte



Längeneinstellung der Schiene:

Länge variabel von 180 – 300 mm
6 Schrauben lösen (Torx-Schlüssel)
Schiene Länge auf mindestens(!) Schulterbreite des Kindes einstellen
Schrauben in 3 und mehr Durchgängen fest anziehen, mit „**LOCTITE 222**“ sichern!

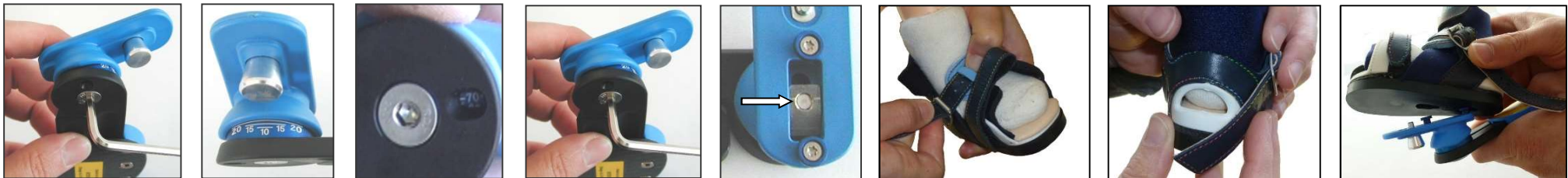

Winkeleinstellung der Schiene:

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Schraube lösen (Inbus-Schlüssel) 2. Dorsalextension einstellen an der Kugelskala (wenn vom Arzt nicht anders angegeben: 5-10°) 3. Abduktion einstellen am Sichtfenster der Schiene (wenn vom Arzt nicht anders angegeben: 70° für einen Klumpfuß, 40° für einen gesunden Fuß) | <ol style="list-style-type: none"> 4. Schraube <u>fest</u> anziehen, dabei gegen ungewolltes Lösen mit „LOCTITE 222“ sichern!
(Achtung: Sonst Gefahr des Verschluckens/Erstickens) |
|--|---|

Anziehen Schuhe und Schiene:

1. Fuß in den Schuh setzen, so dass die Ferse ganz hinten und unten ist – Kontrolle im Fersenfenster
2. erst den mittleren Riemen schließen und fest anziehen (hält die Ferse in richtiger Position), die anderen Riemen lockerer anlegen
3. Schuh von oben auf Klickverschluss setzen und Schiene nach hinten Richtung Ferse schieben bis Bolzen einrastet. Zum Lösen der Schiene Bolzen ziehen, Schiene bis zum Anschlag in Richtung Fußspitze schieben und abheben. Schuhe nicht zum Laufen geeignet! Rutschgefahr!