

Ponseti شگال تقويم التشوه بالقدم للاستعمال بعد انتهاء مرحلة العلاج في إطار العلاج على طريقة بونسيتي تدوم المدة التي ينصح بها لارتداء الشگال التقويمي من تاريخ نزع الجبس إلى السنة الرابعة من عمر ابنكم.



المحتوى:

- حذاء بأربطة® xelF-LFAA أو COMFOOT-Blue®
- مفتاح خاص 4 مم
- مفتاح توركس TX20
- سكة ألفا - فلاكس



معلومات مهمة:

الحذاء: العمر الافتراضي 8 أعوام
الدعامة: للاستخدام لفترة علاج تبلغ 5 أعوام بحد أقصى.
العمر الافتراضي الكلي: 8 أعوام.
يمكنك معرفة تاريخ الصنع من أول رقمين برقم التشغيل.
التخزين: في مكان خالٍ من الصقيع ومحمي من الضوء،
والرطوبة الجوية به متوسط الارتفاع.



اختيار الطول المناسب لسكة:

- يمكن تغيير طول السكة من 180 إلى 300 مم
- افتح مسامير التثبيت الستة (باستعمال مفتاح توركس)
- اختر الطول المناسب (موازي لعرض كتفي الطفل)
- ثبت مسامير التثبيت (3 ليات على الأقل)

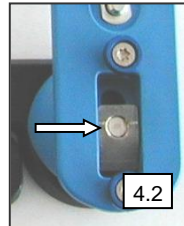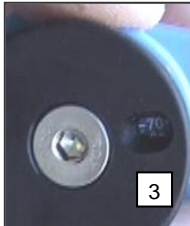

اختيار الطول المناسب للزوايا

4. بت بريمة التثبيت جيداً. لتفادي الفتح المفاجئ بتوا بريمة التثبيت جيداً. لتفادي الفتح المفاجئ والغير مرغوب فيه يجب تثبيت البريمة بواسطة **LOCTITE**.
- !222!
(تنبيه: تنبهوا لخطر البلع والاختناق.)

1. افتح مسامير التثبيت الستة (باستعمال المفتاح الخاص)
2. عدل مدى فتحة الظهر بالمقياس السلمي الكروي (إذا لم ينصح الطبيب بأمر مخالف: 5- 10 درجات)
3. التوسيع إلى الخلف بنافذة سكة (إذا لم ينصح الطبيب بأمر مخالف: 70 درجة بالنسبة للأقدام التوتية المدبسة و40 درجة بالنسبة للأقدام السليمة)

ارتداء الحذاء والسكة

1. ضع القدم في الحذاء بحيث يكون عقب القدم في الخلف تماماً على مستوى الحاشية ومبسط على قاعدة الحذاء - تثبت من موضع العقب من خلال نافذة الكعب
 2. يغلق سير الرّبط الأوسط أولاً ويثبت جيداً (يضمن بقاء عقب القدم في مكانه) ثم تغلق بعد ذلك سيور الرّبط الأخرى دون ضغط قوي.
 3. ضع الحذاء من فوق على نظام التثبيت ثم ادفع بالسكة نحو الخلف باتجاه عقب القدم إلى أن يثبت مسمار التثبيت في مكانه.
- تفتح السكة بجذب مسمار التثبيت ودفع السكة إلى النهاية باتجاه مقدمة القدم ثم تسحب من مكان تثبيتها.
الحذاء غير مناسباً للمشي بسبب خطر الانزلاق!