


جهاز تقويمي لمبادعة القدمين للعلاج اللاحق لحنف القدم مجهول السبب في إطار علاج بونسيتي.  
مدة العلاج الموصى بها: من وقت آخر إزالة للجبس وحتى بلوغ الطفل عمر 5/4 سنوات

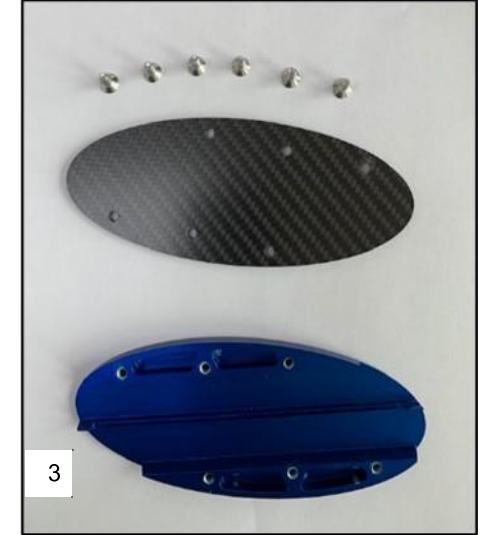

### تركيب الجزء البيضاوي الأوسط ALFA-Flex XL، طقم التمديد (AL 0700 1 -XL):

1. قم بحل 6 براغي للجزء البيضاوي الأوسط الأصلي بالقضيب واخلعهم (مفتاح توركس) واخلع كذلك أذرع القضيب.
2. قم بحل 6 براغي للجزء البيضاوي الأوسط XL، طقم التمديد واخلعهم (مفتاح توركس) واخلع كذلك لوح الغطاء.
3. أدخل أذرع القضيب كما في الصورة 1 في الجسم الأساسي (الأزرق).
4. ركب لوح الغطاء واربط البراغي.
5. اضبط طول القضيب على أدنى (!) عرض كتف للطفل
6. أحكم ربط البراغي بمقدار 3 أشواط أو أكثر، وأمنها باستخدام "LOCTITE 222"!