

مقوم إبعاد القدمين للمعالجة اللاحقة لحنف القدم مجهول السبب في إطار العلاج بطريقة بونسييتي. فترة العلاج الموصى بها: منذ آخر مرة لنزع الجبس وحتى العام الرابع/ الخامس من عمر الطفل.



ضبط طول الدعامة:

الطول متغير من 200 إلى 290 مم


فك البرغيين اللذين يربطان أجزاء الدعامة، وضع الأجزاء فوق بعضها البعض حسب الطول المطلوب (أطول من عرض الكتف بحوالي 1 سم. قم بتحديد طول الدعامة ليكون على الأقل يساوي عرض كنف الطفل. قم بتثبيت شد برغي الأمان الذاتي.

نطاق التسليم

1. حذاء ALFA-Flex أو COMFOOT-Blue
2. مفتاح ألن 4/5 مم
3. مفك Torx Schlüssel TX 10/20
4. دعامة إبعاد القدمين

معلومات مهمة:

الدعامة: للإستخدام لفترة علاج تبلغ 5 أعوام بحد أقصى. العمر الافتراضي الكلي: 8 أعوام. الحذاء: العمر الافتراضي 8 أعوام يمكنك معرفة سنة الصنع من أول رقمين برقم التصنيع. التخزين: في مكان خالٍ من الصقيع ومحمي من الضوء، وفي مكان به رطوبة جوية متوسطة المقدار. . احسبون: במקום קריר אך לא מקפיא, מוצל עם לחות ברמה בינונית

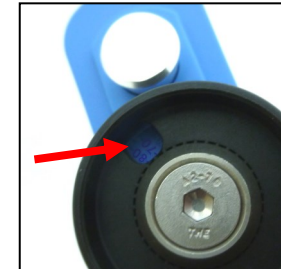

ارتداء الحذاء والدعامة:

1. ضع القدم في الحذاء بحيث يكون عقب القدم في الخلف تمامًا وأسفل بقدر الإمكان - تأكد من الشكل في نافذة عقب القدم.
2. أغلق الحزام الأوسط أولاً واربطه بإحكام (ليحافظ على وضع عقب القدم في الوضع الصحيح)، واربط الحزام الآخر ولكن بدون إحكام.
3. ضع الحذاء من أعلى على القفل ذي السقاطة وحرك الدعامة للخلف باتجاه عقب القدم حتى تثبت المسامير في مكانها. لفك الدعامة انزع المسامير، حرك الدعامة في اتجاه طرف القدم حتى تتوقف في مكانها وارفعها. هذا الحذاء غير مناسب للجري، حيث يكمن خطر الانزلاق!

ضبط زوايا دعامة إبعاد القدمين:

فك البرغي الموجود بالجزء السفلي من الدعامة بمفتاح ألن من خلال لفه ربع لفة، ثم لف اللوح بالترديج نحو الخارج بحيث يثبت عند الدرجة المناسبة (يمكن قراءتها في نافذة العرض). اربط البرغي بإحكام. يوصي بونسييتي بـ 70 درجة للقدم الحنفاء و40 درجة للقدم السليمة.