


Ortoza e lëvizjes së këmbës për trajtimin vijues të një këmbë idiopatike me gungë si pjesë e terapisë Ponseti.  
Kohëzgjatja e rekomanduar e trajtimit: nga koha e heqjes së fundit të gipsit deri në 4./5. Moshë e fëmijës

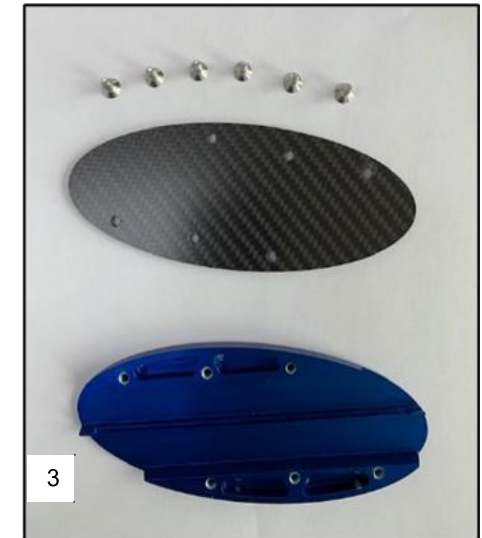

**Montimi i ALFA-Flex XL gjysmë ovale, kompleti i zgjatjes (AL 0700 - 1XL):**

1. Lironi dhe hiqni (çelës Torx) 6 vidha nga forma origjinale gjysmë ovale në shinë dhe hiqni krahët e shinës.
2. Lironi dhe hiqni (çelës Torx) 6 vidha nga forma gjysmë ovale XL, kompleti i zgjatjes dhe hiqni pllakën e mbulimit.
3. Vendosni krahët e shinës në skeletin bazë (blu) si në Figurën 1.
4. Vendosni pllakën e mbulimit dhe vidhoseni.
5. Caktoni gjatësinë e shinës të paktën(!) sa gjerësia e shpatullave të fëmijës
6. Shtërëngoni vidha në 3 ose më shumë kalime, **sigurojini me „LOCTITE 222“!**