

מוט להקרוב (אבדוקציית) הרגל לטיפול עוקב של כף רגל סוסנית (קלאב פוט) אידיופתית במסגרת טיפולים בשיטת פונזטי.  
תקופת טיפול מומלצת: ממועד הורדת הגבס האחרון ועד לגיל 4/5.



### תוכן הערכה:



נעלי Blue-COMFOOT או ALFA-FLEX-  
מפתח אלן 4 מ"מ  
מפתח TX20 TORX  
ALFA-Flex-Brace

משמש לתקופת טיפול של עד 5 שנים.  
תוחלת חיים: 8 שנים.  
נעליים: 8 שנים.  
שנת ייצור: ראה שתי הספרות הראשונות במספר הסידורי.



### התאמת אורכו של המוט:

ניתן להתאים את האורך ל-180 עד 300 מ"מ  
לשחרר את 6 הברגים (מפתח TORX)  
לכוון את אורך המוט לפחות (!) לרוחב הכתפיים של הילד  
להדק את הברגים ב-3 ויותר שלבי הידוק, **ולאבטח בעזרת Loctite 222!**

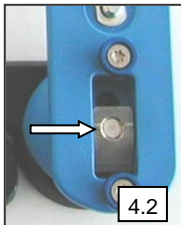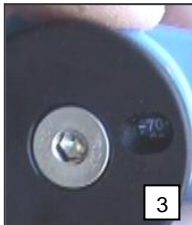

### התאמת זווית המוט:

1. שחרר הברג (בעזרת מפתח אלן)
2. כוון את היישור בסקאלה הכדורית (במידה ולא צוין אחרת על ידי הרופא: 5° - 10°)
3. כוון את ההקרוב (אבדוקציה) בחלונת המוט (במידה ולא צוין אחרת על ידי הרופא: 70° ברגל עם טליפס אידיופתית, 40° ברגל בריאה)
4. הדק את הבורג בחוזקה, **ולאבטח אותו בעזרת Loctite 222 בפני התרופפות בלתי רצויה!** (לתשומת לב: סכנת בליעה/חניקה)

### הנעלת נעליים ומוט

1. הכנס את הרגל אל תוך הנעל, באופן שהעקב תשב לגמרי אחורה ולמטה - לבדוק בחלונת הבקרה
2. לסגור קודם את הרצועה האמצעית ולהדקה (כך מוחזק העקב במצב הנכון), להצמיד את הרצועות האחרות בצורה רופפת.
3. העמיד את הנעל מלמעלה על הנעילה האוטומטית. הזז את המוט לאחור לכיוון העקב, עד שהברג ננעל  
לשחרור המוט משוך את הברג, דחוף את המוט לכיוון קצה הרגל הקדמי, והרם.  
הנעליים אינן מתאימות להליכה! סכנת החלקה