
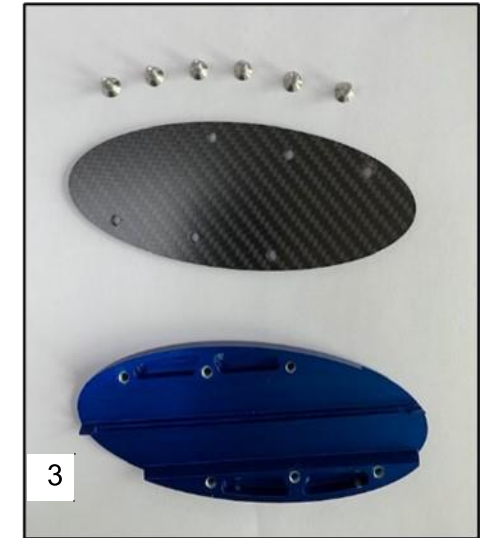


התקן אורתופדי לצידוד כף הרגל, לטיפול המשך בכף רגל אידיופטית כחלק מטיפול בשיטת פונסטי. משך הטיפול המומלץ: מרגע הסרת חבישת הגבס האחרונה ועד שהילד מגיע לגיל 4/5.

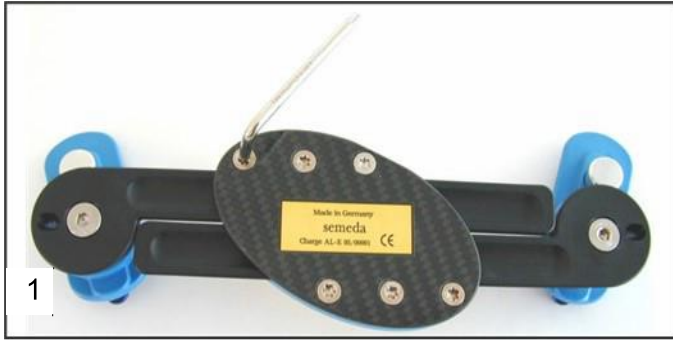

הרכבת יחידת האליפסה המרכזית ALFA-Flex XL, ערכת הארכה (AL 0700 - 1XL):

1. שחרר והסר את 6 הברגים של קיבוע המסילות המקורי מיחידת האליפסה המרכזית (בעזרת מפתח ברגים), והסר את זרועות המסילה.
2. שחרר והסר את 6 הברגים של ערכת ההארכה XL מיחידת האליפסה המרכזית (בעזרת מפתח ברגים), והסר את לוח הכיסוי.
3. הכנס את זרועות המסילה לגוף הבסיס (הכחול) כמוצג באיור 1.
4. הנח את לוחית הכיסוי והדק את הברגים.
5. התאם את אורך המסילה לפחות (!) לרוחב הכתפיים של הילד.
6. הדק את הברגים ב-3 סיבובים או יותר, ואבטח באמצעות "222 LOCTITE"!