

Ortese abduksi kaki untuk pengobatan kemudian kaki gumpal idiopatik dalam terapi ponseti.  
Jangka waktu pengobatan yang di anjurkan: mulaih dari pelepasan gips sampai anak berumur 4/5 tahun.



### Lingkup pengiriman

1. ALFA-Flex- atau sepatu COMFOOT-Blue
2. Kunci socket 4/5mm
3. Kunci Torx TX 10/20
4. Bidai abduksi kaki

### Informasi penting:

Bidai: Pemakaian untuk jangka waktu terapi maksimal 5 tahun. Tahan pakai keseluruhan: 8 tahun

Sepatu: Tahan pakai 8 tahun


Anda mendapat tahun pembuatan dari angka dua pertama dari nomor seri.

Penyimpanan: Menghindari pembekuan, menghindari penerangan, kelembahan udara



### Penyetelan pangan bidai:

- Panjangnya bervariasi dari 200 – 290 mm
- Melepaskan 2 sekrup yang menyambung bagian-bagian bidai, melonggokan bagian-bagian lebar
- Logam kira-kira disesuaikan selebar bahu anak kecil
- Kepercayaan diri dapat memperkuat pendirian

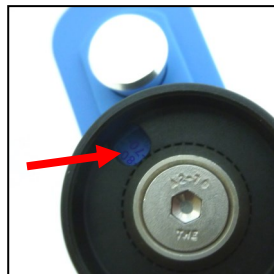

### Penyetelan sudut abduksi:

- Melepaskan sekrup di bagian bawah bidai dengan kunci socket dengan putaran seperempat.
- Kemudian memutar pelat keluar langkah demi langkah dan mengencangkan di angka derajat yang cocok (dapat dibaca di jendela).  
Ponseti manganjrukan 70° untuk kaki gumpal, 40° untuk kaki sehat.
- Kepercayaan diri dapat memperkuat pendirian

### Memakai sepatu dan bidai:

1. Memasukkan kaki ke dalam sepatu, supaya tumitnya ada di belakang sekali dan dibawah – kontrol di jendela tumit
2. Terutama menutup bidai tengah dan menarik yang keras (memegang tumit di posisi yang benar), memasang tali-tali yang lain yang longgar
3. Memasang sepatu dari atas ke penutup dan mendorong bidai ke belakang ke arah tumit sampai bautnya kencang.  
Untuk melepaskan bidai menarik baut, mendorong bidai sampai ujung dan mengangkatnya.

**Sepatu tidak bisa dipakai untuk jalan! Bahaya tergelincir!**