
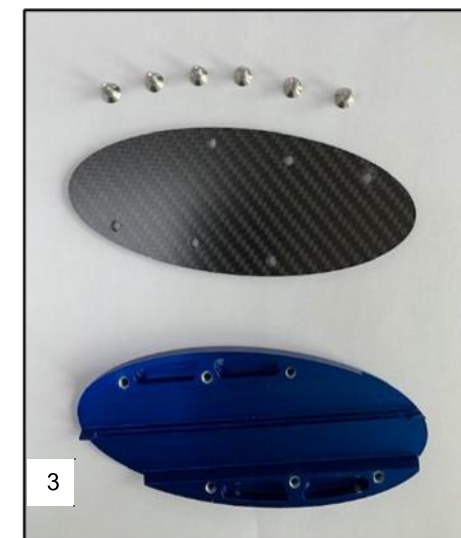


Абдукционный ортез стопы для последующего лечения идиопатической косолапости в рамках терапии по методу Понсети. Рекомендуемая продолжительность лечения: с момента последнего снятия гипса до 4-го/5-го года жизни ребенка.

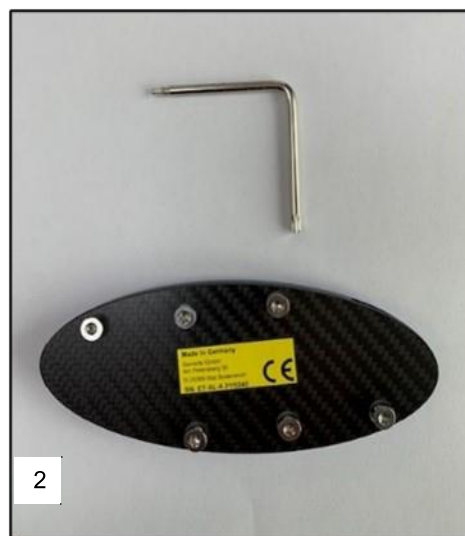

## Установка удлинительного комплекта центрального овала ALFA-Flex XL (AL 0700 - 1XL):

1. Отвинтите и извлеките 6 винтов крепления первоначального центрального овала на направляющей (ключ Torx) и снимите направляющие шины.
2. Отвинтите и извлеките 6 винтов удлинительного комплекта центрального овала XL, (ключ Torx) и снимите крышку.
3. Вставьте направляющие шины в основной корпус (синий), как показано на рисунке 1.
4. Наденьте крышку и прикрутите винты.
5. Установите длину не меньше(!), чем ширина плеч ребенка
6. Крепко затяните винты в три подхода или более, **для надежной фиксации нанесите пасту «LOCTITE 222»!**