

Абдукционный ортез стопы для последующего лечения идиопатической косолапости в рамках терапии по методу Понсети.
Рекомендуемая продолжительность лечения: с момента последнего снятия гипса до 4-го/5-го года жизни ребенка.



Комплект поставки:

Обувь/ крепления для ног ALFA-Flex или COMFOOT-Blue
Шестигранный ключ 4/5 мм
Ключ Torx TX10/20
Абдукционная шина стопы ECO-Brace Light

Важная информация:

Шина: для применения при продолжительности лечения максимум 5 лет. Общий срок службы: 8 лет.


Обувь: срок службы 8 года.
Год изготовления можно узнать по первым двум цифрам серийного номера.

Хранение: в обогреваемом, защищенном от света помещении, со средней влажностью воздуха.



Регулировка длины шины:

- Длина шины регулируется в диапазоне 200 – 290 мм
- Ослабьте 2 винта вверху и внизу на поперечине шины с помощью ключа Torx TX20)
- Установите длину шины как минимум (!) на ширину плеч ребенка.
- Крепко зажмите самоконтращиеся винты.

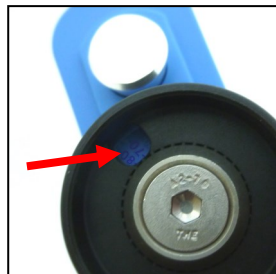

Регулировка угла абдукции:

- Отпустите винт на нижней стороне шины на четверть оборота (шестигранный ключ 5 мм).
- Постепенно поверните наружу синюю пластину крепления ботинка, чтобы она защелкнулась под нужным градусом (видно в смотровом окошке) (Понсети рекомендует 70° при косолапости, 40° при здоровой ноге).
- Крепко зажмите самоконтращийся винт.

Надевание обуви и шины:

- Вставьте стопу ребенка в обувь так, чтобы пятка была в самом низу сзади – контролируйте положение в окошке для пятки.
- Сначала вденьте средний ремешок и прочно затяните (он будет удерживать пятку в правильном положении), остальные ремешки сильно не затягивайте.
- Установите ботинок сверху на защелкивающийся замок и сдвиньте шину назад по направлению к пятке, пока защелкнется стержень замка. Для **снятия** шины натяните стержень, сдвиньте шину до упора в направлении носка стопы и снимите шину.

Обувь не предназначена для ходьбы! Опасность подскользывания!