

Accesorios en la órtesis de abducción del pie para el tratamiento de seguimiento del pie zambo idiopático según el enfoque terapéutico conservador del Dr. Ponseti. Para utilizar en el tratamiento de bebés muy pequeños o prematuros como pieza central corta y ligera de determinadas férulas de abducción del pie.

## Información importante:




### Volumen de entrega:

1 Sameda Mini Steg, barra de férula corta

### Accesorios para:

Férula de abducción del pie ALFA-Flex Light Brace  
Férula de abducción del pie BETA-Flex Brace

### Fecha de fabricación:

En el producto/embalaje según este signo: 

**Vida útil:** 8 años

**Herramienta:** llave Allen/llave Torx  
(se incluye con la férula de abducción del pie)

**Almacenamiento:** en un lugar sin heladas, protegido de la luz y con humedad media-alta

**Limpieza:** solo con un paño húmedo, ¡no utilizar productos de limpieza agresivos!

### Aplicación:

El accesorio se inserta en la férula de abducción del pie como pieza central. La férula de abducción del pie se utiliza como sistema ortopédico de abducción del pie con los soportes del pie correspondientes y, en caso necesario, otros accesorios.

**Al montar los accesorios en la férula de abducción del pie, todos los tornillos deben asegurarse con un fijador de roscas.**

### Tenga en cuenta:

para los accesorios de Sameda Mini Steg, barra de férula corta, se aplican las **instrucciones de uso de Sameda con número de identificación: TL 30nn-002**  
(nn = código numérico de los distintos idiomas)

## Insertar en el ALFA-Flex Light Brace\*:

1. Afloje el tornillo del soporte inferior de un solo lado de la férula de abducción del pie ALFA-Flex Light Brace por el momento. Para ello, utilice la herramienta adjunta a la férula: llave Allen (SW 4). Asegúrese de no perder ninguna de las piezas.
2. Gire con cuidado la férula. Retire el soporte superior, la semiesfera y la placa de montaje de la zapata. Preste especial atención a la pieza a presión con la rosca interior en la placa de montaje de la zapata.
3. Coloque la Sameda Mini Steg en el tornillo del soporte inferior con el orificio en el extremo de la barra. La parte superior de la barra de la férula está marcada con una pegatina del producto de color claro, que debe apuntar hacia arriba. Coloque el soporte superior, la semiesfera y la placa de montaje de la zapata en el tornillo uno tras otro. Compare la disposición de cada una de las piezas con el montaje original del otro lado en la barra ALFA-Flex Light y la figura 4. Asegúrese de que la pieza a presión está insertada en la posición correcta.
4. Asegure los tornillos con un fijador de roscas. Apriete el tornillo del soporte inferior. Repita los pasos 1 a 3 en el otro lado.

\*El color de la muestra en las imágenes difiere del producto original.



## Insertar en el BETA-Flex Brace:

1. Afloje dos vueltas completas los dos tornillos de la carcasa del rotor de la férula de abducción del pie BETA-Flex Brace. Para ello, utilice la herramienta adjunta a la férula: llave Torx T10.
2. Separe la carcasa del rotor un poco por la parte inferior. Tire de la férula para extraerla de la carcasa del rotor. Repita los pasos 1 y 2 en la segunda carcasa del rotor. Ahora, la férula de abducción del pie se desmonta en 3 partes.
3. Inserte la Sameda Mini Steg, barra de férula corta, en la carcasa del rotor. La parte superior de la barra de la férula está marcada con una pegatina del producto de color claro. La barra de la férula debe insertarse en las carcasas de los rotores de manera que las placas de montaje de la zapata y la barra de la férula queden colocadas como en la figura 3. Vuelva a presionar la carcasa del rotor respectiva para que se cierre el hueco en la barra de la férula.
4. Compruebe que la carcasa del rotor encaja perfectamente en la Sameda Mini Steg insertada. Asegure los tornillos con un fijador de roscas. Apriete dos vueltas completas los dos tornillos de la carcasa del rotor respectiva con la llave Torx T10.

