

Dr. Ponseti'nin geleneksel tedavi yaklaşımına göre idiopatik içe çarpık ayağın tamamlayıcı tedavisine yönelik ayak abdüksiyon ortezinde aksesuarlar. Belirli ayak abdüksiyon atellerinin son derece kısa ve hafif orta parçası olarak çok küçük veya erken doğan bebeklerin tedavisinde uygulanır.

Önemli bilgiler:

Teslimat kapsamı: 1 adet Sameda Mini Bar, kısa atel barı

Aksesuarın ait olduğu ürün:

ALFA-Flex Light Brace ayak abdüksiyon ayracı

BETA-Flex Brace ayak abdüksiyon ayracı

Üretim tarihi: Üründe/ Ambalajda şu işaretten sonra:



Ömrü: 8 yıl

Alet: Alyan anahtarı/ Torx anahtarı
(ayak abdüksiyon ateli yanında)

Depolama: Donmaya ve ışığa karşı korunmuş, ortalama hava nemi

Temizleme: Sadece nemli bezle, aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın!

Kullanım:

Aksesuar ayak abdüksiyon ateline orta parça olarak yerleştirilir. Ayak abdüksiyon ateli uygun ayaklıklar ve icabında başka aksesuarlar ile ayak abdüksiyon ortezi sistemi olarak kullanılır.

Aksesuarın ayak abdüksiyon ateline montajı sırasında tüm vidalar vida emniyeti maddesiyle emniyete alınmalıdır!


Lütfen şu hususu dikkate alın:

Sameda Mini Bar, kısa atel barı aksesuarı için şu kod numaralı **Sameda kullanım kılavuzu geçerlidir:**
TL 30nn-002
(nn = Farklı dillerdeki sayı kodu için yer tutucu)

ALFA-Flex Light Brace* içine yerleştirme:

1. Önce sadece ALFA-Flex Light Brace ayak abdüksiyon atelinin bir tarafındaki alt tabanın vidasını sökün. Bunun için atelin yanında verilmiş şu aleti kullanın: Alyan anahtarı (SW 4). Parçalardan hiçbirinin kaybolmamasına dikkat edin.
2. Ateli dikkatlice ters çevirin. Üst tabanı, yarım küreyi ve ayakkabı yerleştirme plakasını çıkarın. Özellikle de ayakkabı yerleştirme plakasındaki iç dişliye sahip baskı parçasına dikkat edin.
3. Sameda Mini Barı, bar ucundaki delikle alt tabanın vidasına takın. Atel barının üst tarafı açık renkli bir ürün etiketiyle işaretlenmiştir, bu yukarıya bakmalıdır. Ardı ardına üst tabanı, yarım küreyi ve ayakkabı yerleştirme plakasını vidaya takın. Parçaların dizilişini ALFA-Flex Light Barın diğer tarafındaki orijinal dizilişi ve Resim 4 ile karşılaştırın. Baskı parçasının doğru pozisyonda yerleştirilmesine dikkat edin.
4. Vidaları vida emniyeti maddesiyle emniyete alın. Alt tabandaki vidayı sıkın. 1-3 arası adımları diğer taraf için tekrarlayın.

*Fotoğraftaki numunenin rengi orijinal üründen farklı olabilir

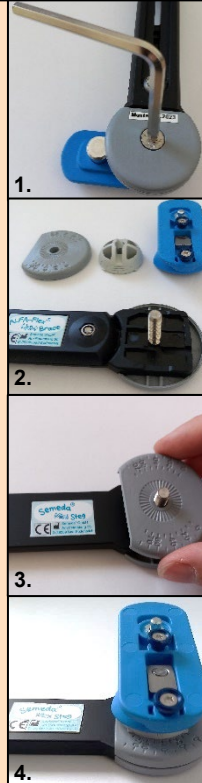

BETA-Flex Light Brace içine yerleştirme:

1. BETA-Flex Brace ayak abdüksiyon atelinin rotor gövdesindeki iki vidayı iki tam dönüş gevşetin. Bunun için atelin yanında verilmiş şu aleti kullanın: Torx anahtarı T10.
2. Rotor gövdesini alt tarafından bir aralık genişliğinde ayırın. Atel barını rotor gövdesinden çekip çıkarın. 1. ve 2. adımları 2. rotor gövdesi için tekrarlayın. Ayak abdüksiyon ateli şimdi 3 parçaya ayrılmıştır.
3. Sameda Mini Barı, kısa atel barını rotor gövdesine yerleştirin. Atel barının üst tarafı açık renkli bir ürün etiketiyle işaretlenmiştir. Atel barı, ayakkabı yerleştirme plakaları ve atel barı Resim 3'teki gibi bir pozisyonda olacak şekilde rotor gövdesine yerleştirilmelidir. Atel barındaki aralık kapanacak şekilde rotor gövdesini tekrar birbirine bastırın.
4. Rotor gövdesinin yerleştirildiği Sameda Mini Barın etrafında tam olarak kapanıp kapanmadığını kontrol edin. Vidaları vida emniyeti maddesiyle emniyete alın. Rotor gövdesindeki iki vidayı T 10 Torx anahtarıyla iki tam dönüş sıkın.

